



5G 设备使用流程

1. 登录小程序（已经登录实名的用户直接进行第 2 步骤）

1.1. 微信扫描设备背后的二维码（带蓝色血压或血糖字样的），跳转到易初云医小程序，登录小程序。

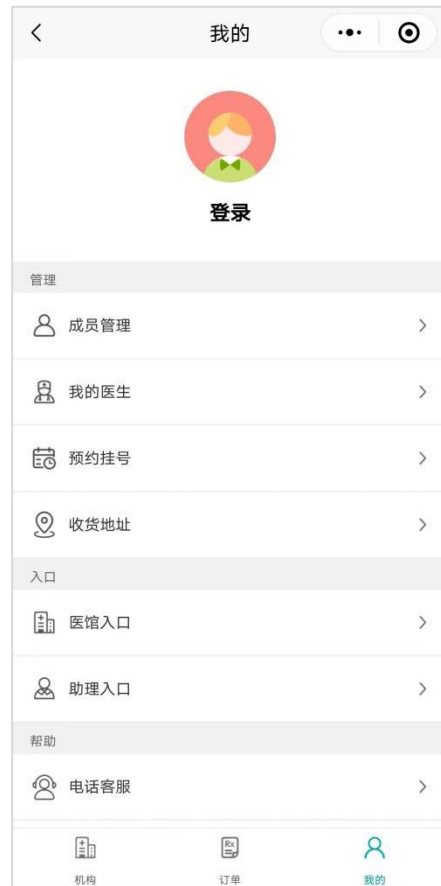

1.2. 点击-我的-头像，扫身份证或者手动输入实名用户信息，保存。

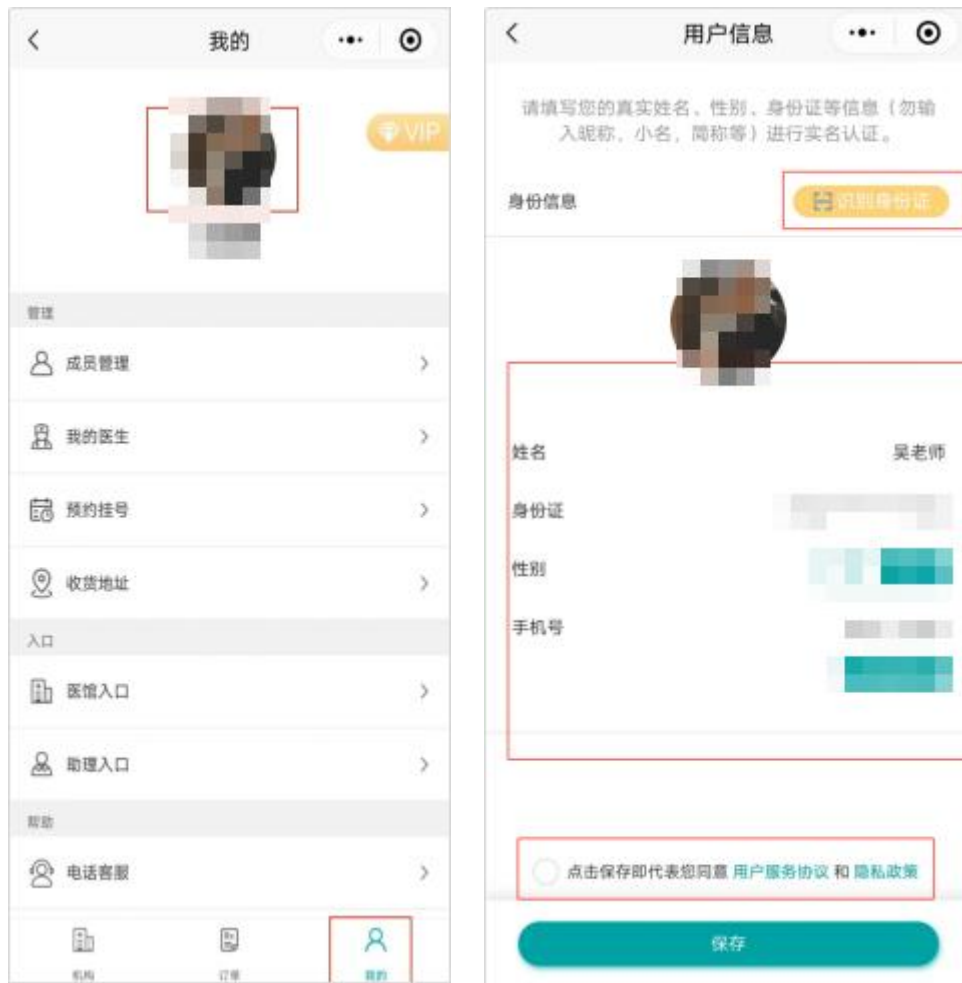

2. 绑定设备

2.1. 微信扫码设备背后的二维码（带蓝色血压或血糖字样的），跳转到易初云医小程序血糖/血压记录页面。



2.2. 点击下方“5G 设备”按钮，手动输入 SN 码或者点击扫一扫按钮，扫描设备背后的 SN 二维码获取。获取后绑定设备。



3. 更改与解绑设备

3.1. 绑定设备后，点击下方“5G 设备”按钮，手动修改 SN 码，点击更改，修改绑定的设备 SN 码。

3.2. 绑定设备后，点击下方“5G 设备”按钮，点击解绑设备，解除小程序绑定的设备。




4. 测量血压/血糖

按照设备使用说明，测量血压或血糖，测量完成后，测量数据会自动上传到历史数据中。点击可查看数据详情。



5. 趋势分析

点击趋势分析，可查看连续多次的血糖/血压趋势

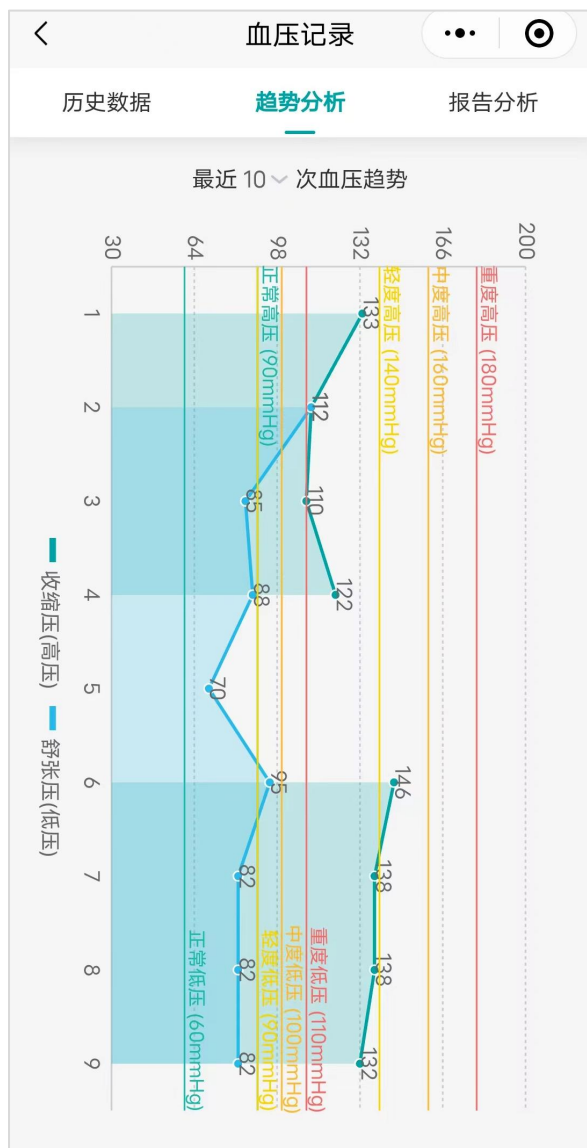


6. 报告分析

点击报告分析，可以查看某一月份的数据分析



6.1. 找医生

选择找医生，可以选择平台上的医生进行问诊。

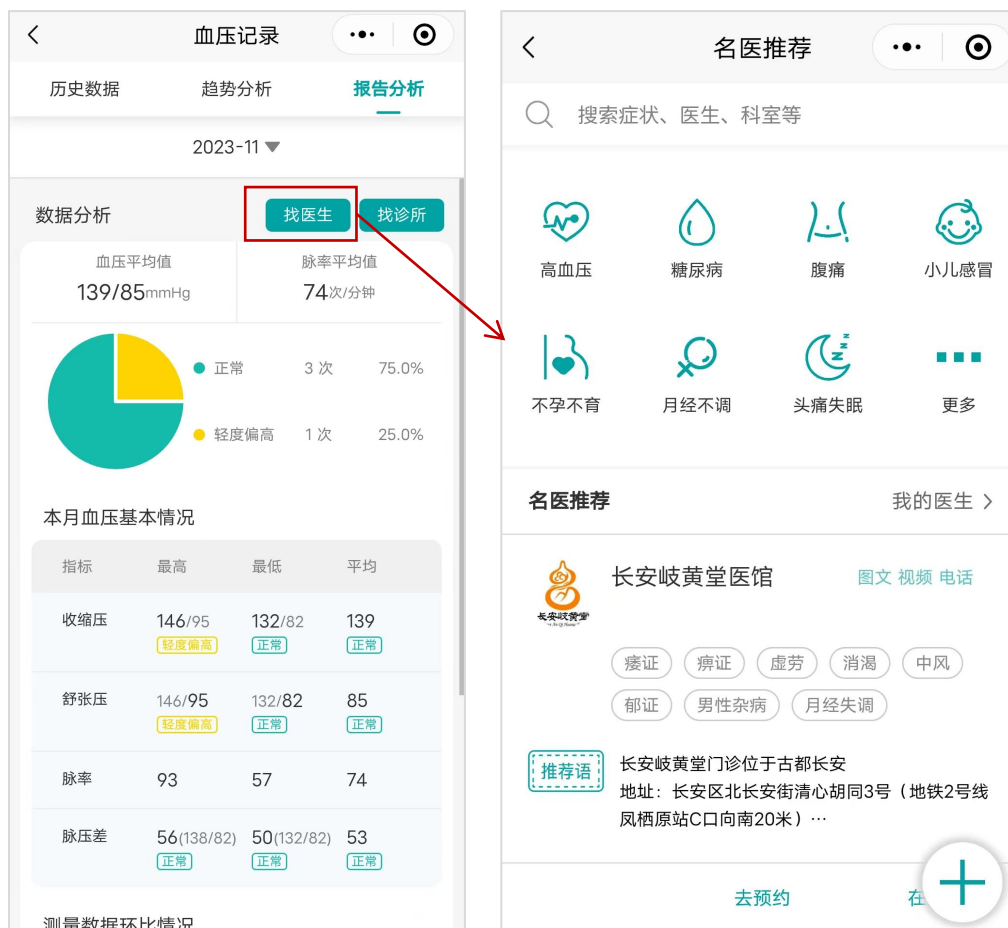

6.2. 找诊所

选择找诊所，可以选择附近诊所（打开手机定位），进入诊所主页选择项目或者诊所医生问诊。

血压记录

历史数据 趋势分析 **报告分析**

2023-11

数据分析 **找医生** **找诊所**

血压平均值 139/85mmHg 脉率平均值 74次/分钟

● 正常 3次 75.0%
● 轻度偏高 1次 25.0%

本月血压基本情况

指标	最高	最低	平均
收缩压	146/95 轻度偏高	132/82 正常	139 正常
舒张压	146/95 轻度偏高	132/82 正常	85 正常
脉率	93	57	74
脉压差	56(138/82) 正常	50(132/82) 正常	53 正常

测量数据环比情况

查找机构

市中区

附近机构 **足迹**

- 四里村街道办事处社区卫生服务中心**
山东省济南市市中区建设路与经十一路交叉口正东方向74米 **详情** 已认证
- 济南静和医院**
山东省济南市天桥区历山北路板桥广场内 已认证
- 济南舜华街道综合养老中心医务室**
济南舜华街道综合养老中心 已认证
- 云壶互联网医院**
山东省济南市槐荫区中绿地中央广场中泽大厦21楼2102号 已认证
- 易初慧康中医馆**
山东省济南市历下区解放东路15号仁恒世纪花园10号楼1-106 已认证